


## ISTRUZIONI D'USO "Rapid SARS-CoV-2 Antigen Card" (BOSON BIOTECH)

Sono di seguito indicati i principali passaggi relativi all'esecuzione e interpretazione dell'auto-test (self-test) per la ricerca degli antigeni di SARS-CoV-2. Per ulteriori specifiche è possibile consultare il foglietto illustrativo del kit originale.

### PREPARATIVI

- 1) Predisporre una superficie piana, pulita e asciutta; prevedere un timer
- 2) Controllare il contenuto del kit di testing e assicurarsi che nulla sia danneggiato o rotto
- 3) Soffiare il naso
- 4) Lavare le mani

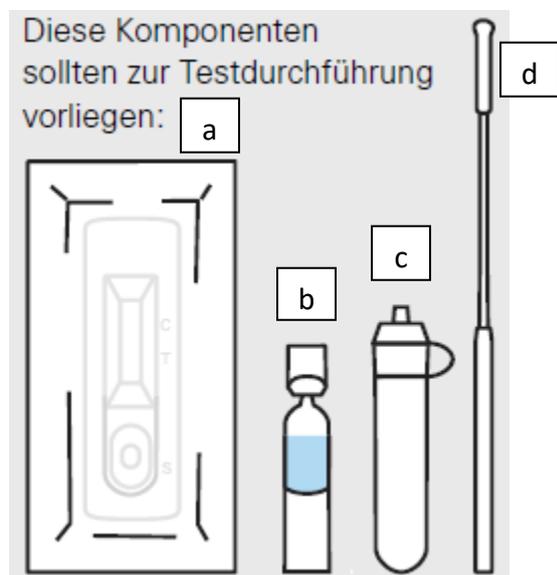

Per ogni singolo test sono predisposti:

- a) cassetta di testing confezionata singolarmente;
- b) soluzione di estrazione (sigillata);
- c) provetta di estrazione;
- d) tampone per la raccolta del campione confezionato singolarmente

**1**

Extraktionslösung öffnen  
und vollständig in das  
Teströhrchen einfüllen




1)

- Estrarre la cassetta di testing dalla propria confezione e disporla sulla superficie precedentemente predisposta (NB: la cassetta dovrà essere utilizzata subito dopo l'apertura)
- Aprire la soluzione di estrazione
- Versarne l'intero contenuto nella provetta di estrazione, evitando bolle

## RACCOLTA DEL CAMPIONE

- 2** Nasen-Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher langsam jeweils ca. 2,5 cm einführen, dabei keinen Druck ausüben. Jeweils drei- bis viermal drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen (ca. 15 Sekunden)

3-4 x

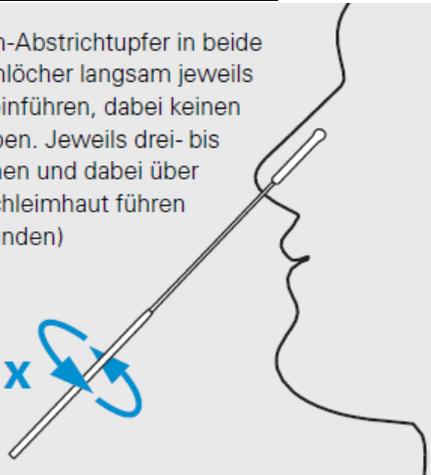

2)

- Dopo averlo tolto dalla confezione, inserire delicatamente il tampone nasale in una narice; la punta del tampone deve essere inserita ad almeno 2,5 cm di profondità, senza spingere (NB: non inserire il tampone più a fondo se si sente resistenza o dolore).
- Far ruotare il tampone 4 volte all'interno della narice, strisciandolo sulla mucosa nasale. Lasciare il tampone nella narice per qualche secondo.
- Ripetere la procedura CON LO STESSO TAMPONE nell'altra narice.

## TRATTAMENTO DEL CAMPIONE ED ESECUZIONE DEL TEST

**3**  
mind.  
**3-5 x**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8**

Nasen-Abstrichtupfer in das Röhrchen einführen und drei- bis fünfmal drehen

Nasen-Abstrichtupfer 1 Minute im Röhrchen stehenlassen

Röhrchen mehrmals gegen Nasen-Abstrichtupfer zusammenpressen, um Antigene zu lösen

Nasen-Abstrichtupfer unter festem Druck auf die Röhrchenwand entnehmen und Tropfkappe fest aufsetzen

Drei Tropfen in Probenvertiefung auf der Testkassette geben

**3 Tropfen**

Ergebnis nach **15-20 Minuten** ablesen

Nach mehr als 20 Minuten kein Ergebnis mehr auswerten!


- 3) Inserire il tampone nella provetta precedentemente riempita con la soluzione di estrazione e, una volta immersa la punta, ruotarlo 5 volte
- 4) Lasciare il tampone nella provetta per 1 minuto

Monitoraggio della popolazione scolastica tramite test nasali nel periodo compreso tra il 24.12.2021 e il 09.01.2022 - Allegato 1 (documento del 22.12.2021)



- 5) Premere la provetta più volte, stringendo il tampone al suo interno, per facilitare il rilascio del liquido. Estrarre ed eliminare il tampone
- 6) Chiudere la provetta con il tappo dosatore (contagocce)
- 7) Aggiungere 3 gocce del campione nel pozzetto della cassetta di testing contrassegnato con la lettera "S" sulla cassetta del test, facendo attenzione che non si formino bolle
- 8) L'esito è pronto dopo 15 - 20 minuti. Non interpretare esiti dopo più di 20 minuti!

## INTERPRETAZIONE DELL'ESITO

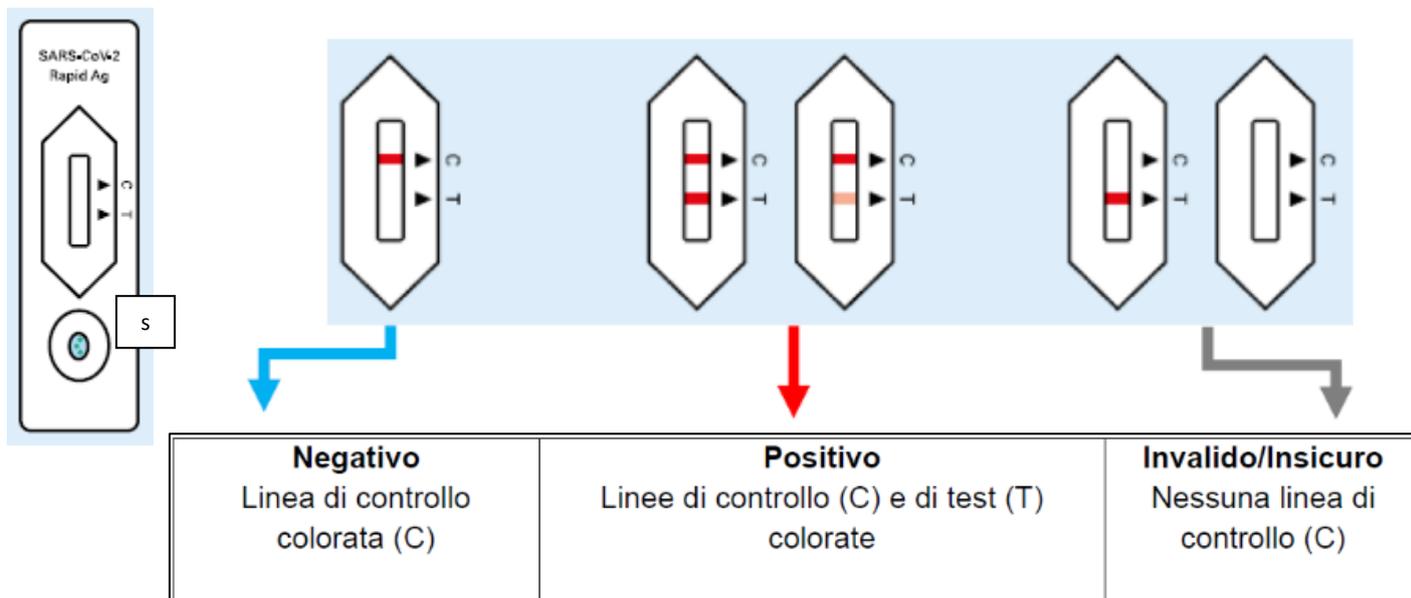

Smaltire il materiale utilizzato con i normali rifiuti domestici, in conformità con le normative locali.

## ATTIVITA' DA INTRAPRENDERE

**ESITO NEGATIVO:** i test antigenici rapidi sono una delle misure adottate per tenere sotto controllo la diffusione di SARS-CoV-2. Anche in caso di negatività, seppur con carica virale non alta, l'infezione non può essere del tutto esclusa; è pertanto sempre importante attenersi alle altre semplici misure di contenimento, ovvero

- ☑ mantenere il distanziamento
- ☑ coprire naso e bocca con una mascherina

Monitoraggio della popolazione scolastica tramite test nasali nel periodo compreso tra il 24.12.2021 e il 09.01.2022 - Allegato 1 (documento del 22.12.2021)



- ☒ lavarsi le mani
- ☒ tossire e starnutire solo nell'incavo del braccio
- ☒ arieggiare regolarmente i locali

Sarà necessario proseguire con il monitoraggio tramite autotest ogni tre giorni.

ESITO NON INTERPRETABILE: ripetere il test, soffiando bene il naso prima.

ESITO POSITIVO: La procedura prevede l'accesso al link <https://covidmonitor.sabes.it/scuola> con possibilità di scaricare il modulo di richiesta per test antigenico rino-faringeo effettuabile presso il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta ovvero farmacia territoriale, senza addebito a carico dell'utente.

Successivamente a tampone nasale autosomministrato positivo il test diagnostico dovrà essere effettuato prima possibile e l'eventuale positività a test antigenico effettuato dal medico di medicina generale o farmacia comporta l'adozione dei provvedimenti di sanità pubblica già previsti (isolamento domiciliare e quarantena per i contatti stretti).

L'Unità di Sorveglianza Epidemiologica provvederà a contattare prima possibile l'utente positivo per lo svolgimento dell'indagine epidemiologica.

